

TEST CANNABIS SU URINA

• Generalità


La cannabis è una droga allucinogena che modifica le percezioni sensoriali, il coordinamento delle funzioni motorie e della memoria. Qualsiasi azione che richieda attenzione diventa pertanto rischiosa, in particolare la guida di un veicolo. Degli studi hanno dimostrato che i conducenti che hanno consumato cannabis nelle tre ore precedenti hanno un rischio maggiore di un incidente con collisione. Il TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR è un test rapido che rileva il consumo di cannabis in 5 minuti e le consente di autocontrollarsi prima di mettersi al volante di un veicolo o adattare il suo comportamento di consumo.

In seguito al consumo di cannabis, i suoi derivati chimici sono eliminati nelle urine: il TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR rileva questi derivati.

Il TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR consente di rilevare sia i consumatori occasionali che i consumatori regolari. I primi sono rilevabili per un periodo da due a cinque giorni. I secondi sono rilevabili per un periodo che può estendersi a diverse settimane (fino a 10 settimane). La possibilità di rilevare l'uso della cannabis su un periodo molto esteso è il vantaggio del test su urina.

• Contenuto del kit

La confezione contiene un foglio illustrativo da leggere e seguire attentamente per ottenere un risultato affidabile e due sacchetti ermeticamente sigillati, da aprire solo al momento del test e contenenti ognuno: un dispositivo di screening, una pipetta in plastica monouso, una bustina anti-umidità. Non aprire la bustina anti-umidità.

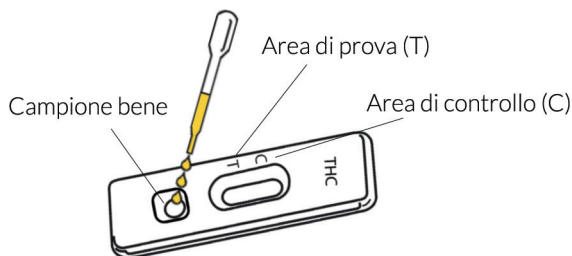

• Precauzioni per l'uso


1. Non ingerire il TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR.
2. Leggere attentamente le istruzioni.
3. Il test deve essere conservato tra 2 °C e 30 °C. Non deve essere congelato.
4. Il test deve essere utilizzato prima della data di scadenza riportata sulla confezione e sul sacchetto.
5. Il test deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. Smaltire tutti gli elementi nel cestino dopo l'uso.

• Procedura

1. Raccogliere l'urina in un contenitore pulito (ad esempio in un bicchiere di plastica), evitare il primo getto.
2. Aprire il sacchetto di alluminio (nella posizione della tacca), estrarre la cassetta test, metterla su una superficie piana e buttare la bustina anti-umidità.
3. Servirsi della pipetta per raccogliere e trasferire 3 gocce di urina nel pozzetto campione, tenendo la pipetta in posizione verticale.
4. Leggere il risultato sulla finestra di lettura 5 minuti dopo aver trasferito l'urina. Non interpretare oltre i 10 minuti.


• Interpretazione del risultato

POSITIVO

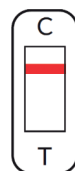

Il test è positivo quando appare una singola banda nella finestra di lettura sotto il segno C (Controllo). Questo risultato significa che l'urina contiene derivati della cannabis in una concentrazione superiore alla soglia, sopra la quale l'attenzione rischia di essere perturbata, in particolare per alcune attività richiedenti alta concentrazione. In questo caso, non dovrebbe intraprendere alcuna azione che richieda la sua piena attenzione o concentrazione, come guidare un veicolo.


NEGATIVO

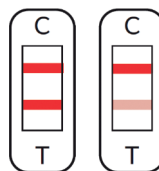

Il test è negativo quando nella finestra di lettura appaiono due bande sotto i segni T (Test) e C (Controllo). Ciò significa che l'urina non contiene prodotti derivati dalla cannabis o ne contiene una quantità inferiore alla soglia di 50 ng/ml.

L'intensità della linea T può essere inferiore all'intensità della linea C: questo non influisce sul risultato ottenuto.

INVALIDO

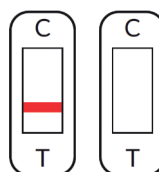

Il test è invalido se non appare alcuna banda o se appare solo una banda nella finestra di lettura sotto il segno T (Test). Molto spesso questo accade quando non vengono seguite le istruzioni nel foglio illustrativo.

Leggere attentamente le istruzioni e ricominciare con un nuovo TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR.

LOT



DOMANDE & RISPOSTE

• Come funziona il TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR?

Dopo il consumo di cannabis, il corpo elimina alcuni dei suoi derivati nelle urine. Utilizzando anticorpi in grado di riconoscere questi derivati, il TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR rivelerà la loro presenza. Se la concentrazione di questi derivati è superiore a 50 ng / ml, il test sarà positivo.

• Quando posso fare il test?

Il test può essere eseguito su un campione di urina ottenuto in qualsiasi momento della giornata.

• Devo osservare una dieta particolare?

L'ingestione di una quantità anomala di liquidi può influire sul test. Se il soggetto beve troppo il giorno prima del test, il test sarà falsamente negativo. Se il soggetto non beve abbastanza il giorno prima del test, il test sarà falso positivo.

• Per quanto tempo la cannabis resta nelle urine?

L'urina di un consumatore occasionale sarà positiva 30 minuti dopo il consumo per un periodo da due a cinque giorni in media.

L'urina di un consumatore frequente può mantenere traccia dell'uso di cannabis per diverse settimane.

• Posso ottenere risultati errati?

Affinché il test sia affidabile, le indicazioni nelle istruzioni devono essere scrupolosamente osservate.

La quantità e la qualità delle urine raccolte saranno decisive per ottenere il risultato corretto. In effetti, il risultato può essere distorto se la cassetta è bagnata prima del test o se la quantità di urina depositata nel pozzetto campione della cassetta non è sufficiente.

La pipetta di plastica fornita nella confezione garantisce la raccolta del volume corretto di urina.

• Ho inserito più di 3 gocce nel pozzetto. Otterrò un risultato preciso?

Sì, ma è consigliabile rispettare il volume raccomandato (3 gocce).

• Ho messo meno di 3 gocce nel pozzetto. Otterrò un risultato preciso?

No. Se il volume delle urine è inferiore a 3 gocce, il test potrebbe risultare invalido.

• Ho letto il risultato dopo 10 minuti. Avrò un risultato affidabile?

No. Il risultato deve essere letto 5 minuti dopo aver depositato le 3 gocce di urina nel pozzetto della cassetta del test, in conformità con le istruzioni per l'uso del test riportate nel foglietto illustrativo.

Oltre i 10 minuti, l'interpretazione del risultato del test non è più affidabile.

• Come interpretare il test se l'intensità delle bande T e C sono diverse?

L'intensità delle bande non ha importanza per la lettura del risultato. Le bande devono essere solo omogenee e continue.

• A cosa serve la linea sotto il segno C (controllo)?

Se appare la linea sotto il segno C, significa che il test ha funzionato. Se la linea sotto il segno C non appare, significa che il test non ha funzionato.

È necessario ricominciare con un nuovo test.

• Cosa fare se il risultato è positivo?

Se il risultato è positivo, significa che il test ha rilevato più di 50 ng / ml di THC nelle urine e quindi la persona testata ha recentemente usato cannabis. Non dovrebbe intraprendere alcuna azione che richieda la sua piena attenzione o concentrazione come guidare un veicolo.

Interrompa il consumo e ripeta con un nuovo test alcuni giorni dopo. In caso di consumo regolare, il test può rimanere positivo per diverse settimane.

• Cosa fare se il risultato è negativo?

Se il risultato è negativo, non ci sono precauzioni speciali da prendere.

• Quanto è affidabile il Medisur del TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR?

Il tasso di affidabilità varia in base alla soglia di rilevamento.

Soglia di rilevamento 11-nor- Δ^9 -THC-9 COOH (ng/mL)	Affidabilità
50	87%
62,5	90%
75	100%

contact@medisur.fr
+33 4 42 96 09 68
www.medisur.fr



MEDISUR
100 Impasse des Houillères
13590 Meyreuil, Francia

ref.CANNA_URI01
rev. 01/2020

